



VeinSpy Rilevatore Vene Portatile

Codice GEF (SKU) 23450

EAN / GTIN 8903272033771

VeinSpy™ è un dispositivo portatile per facilitare la visualizzazione delle vene nei pazienti adulti, pediatrici, geriatrici, obesi e di carnagione scura con accesso venoso difficoltoso. Si basa sulla

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VeinSpy™ è un dispositivo portatile per facilitare la visualizzazione delle vene nei pazienti adulti, pediatrici, geriatrici, obesi e di carnagione scura con accesso venoso difficoltoso. Si basa sulla tecnologia dell'illuminazione trasversale: i fasci luminosi provenienti da un array circolare di LED penetrano nella pelle e fungono da fonte luminosa per ottenere un'illuminazione profonda dei tessuti sottocutanei. Le vene nell'area illuminata assorbono la luce e risaltano come linee scure. Il dispositivo VeinSpy™ è costituito da due serie di LED colorati: una serie emette luce arancione ottimale per le vene superficiali, un'altra serie emette luce rossa per trovare le vene più profonde. Vantaggi di VeinSpy™: - riduce le punture multiple di ago e facilita la scelta del punto di inserimento dell'ago - nessun ritardo nel trattamento a causa dell'accesso venoso difficoltoso - riduce il dolore del paziente dovuto all'inserimento dell'ago - aumenta il confort del paziente, evita gli ematomi Come usare VeinSpy™ 1- Pulire l'area della cute del paziente con un batuffolo imbevuto di alcol 2- Inserire VeinSpy™ nella guaina monouso e accendere l'apparecchio. 3- Muovere VeinSpy™ trasversalmente e in avanti per ottenere una visualizzazione chiara della vena specifica 4- Dopo aver visualizzato la vena, muovere il dispositivo in modo tale che l'ago possa essere inserito facilmente 5- Premere delicatamente VeinSpy™ sulla vena, inserire l'ago nella vena attraverso l'estremità aperta di VeinSpy™

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8903272033771

CODICE GEF

23450



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697