



AUTOCLAVE EURONDA E8 B 24 litri display soft touch 2,4"

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35678

EAN / GTIN 8023279356786

Confezione 1

AUTOCLAVE EURONDA E8 B 24 litri - display soft touch 2,4" E8 offre il perfetto equilibrio tra prestazioni e solidità, potenza e consumi, semplicità e flessibilità. La camera da 24 litri e il porta-vassoi con 5 vassoi inclusi garantiscono una capacità di carico ottimale con il minimo ingombro. - L'interfaccia semplice da utilizzare e il display a colori da 2,4" facilitano qualsiasi operazione. - Cicli e test programmabili. - La SD card integrata rende i dati del ciclo facilmente disponibili su PC, grazie al software E-Memory. AUTOCLAVI EURONDA PRO SYSTEM Euronda Pro System è il sistema di protezione sviluppato per garantire un processo completo ed efficace di sterilizzazione degli strumenti, tutelando la sicurezza degli operatori, dei pazienti e dell'ambiente di lavoro. Dispositivo Medico di Classe IIb Certificato MDR. Sistema modulare La struttura modulare delle autoclavi Euronda consente di rimuovere agevolmente i pannelli laterali, facilitando la manutenzione. Sistema di ispezione Conforme a EN 13060. Il sistema di ispezione semplifica e velocizza la pulizia del serbatoio. Conducimetro integrato Monitora la qualità dell'acqua, evitando possibili malfunzionamenti dovuti all'uso di acqua non idonea. Generatore di vapore istantaneo Garantisce prestazioni eccellenti in termini di velocità, sicurezza e sterilità. Ottimizza il consumo di acqua calibrandolo in base al carico e, in sinergia con gli elementi riscaldanti, offre un'asciugatura perfetta. Separatore aria-acqua Funge da protezione per la pompa a vuoto, evitando che residui di sporco, olio lubrificante e vapore danneggino i componenti interni, conservandone così l'efficienza e l'affidabilità nel tempo. Sistema di controllo dello sporco Consente la separazione precisa dei flussi di acqua pulita e sporca per preservare la massima efficienza. Sistema di raffreddamento intelligente Una sonda consente la gestione più efficiente della pompa a vuoto, garantendone lunga durata ed efficacia. 3 test di controllo inclusi Verificano l'efficacia operativa (Vuoto, Helix, Bowie & Dick). Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

● SOFTWARE

- E-Memory: archiviazione, gestione e tracciabilità dei cicli di sterilizzazione e dei dati su PC
- E-Data: collegamento di autoclavi al sistema di gestione per registrare e tracciare i dati. Compatibile con Windows e iOS.

● CARATTERISTICHE TECNICHE E8

- Capacità camera: 24 l
- Capacità vassoi: 700 cm²
- Consumo acqua per ciclo: 0,3 l
- Capacità pompa a vuoto: 18 l/min doppia testa
- Capacità serbatoio: 4 l per acqua sporca, 4 l per acqua pulita
- Carico solido/poroso max: 6/2 kg
- Display a colori: 2,4"
- Profondità min. piano di appoggio: 50 cm
- Larghezza min. piano di appoggio: 46 cm
- Spazio min. sopra serbatoio: 30 cm
- Dimensioni esterne: 46x61xh 45,5 cm
- Peso: 48 kg
- Alimentazione: 230 V 50/60 Hz
- Potenza assorbita: 2300 W 10 A
- B 121°
- Pressione: 1,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 20 min
- Durata della fase di asciugatura: 15 min
- Durata totale con carico standard*: 44 min
- Carico solido/poroso max: 6 / 2 kg
- B 134°
- Pressione: 2,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 4 min
- Durata della fase di asciugatura: 15 min
- Durata totale con carico standard*: 29 min
- Carico solido/poroso max: 6 / 2 kg
- B 134° Prion
- Pressione: 2,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 18 min
- Durata della fase di asciugatura: 15 min
- Durata totale con carico standard*: 43 min
- Carico solido/poroso max: 6 / 2 kg
- B 134° rapido
- Pressione: 2,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 3 min 30"
- Durata della fase di asciugatura: 4 min
- Durata totale con carico standard*: 27 min
- Carico solido/poroso max: 0,6 / 0,2 kg
- B 134° Prion rapido
- Pressione: 2,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 18 min

- Durata della fase di asciugatura: 4 min
- Durata totale con carico standard*: 42 min
- Carico solido/poroso max: 0,6 / 0,2 kg
- N 121° **
- Pressione: 1,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 20 min
- Durata della fase di asciugatura: 4 min
- Durata totale con carico standard*: 33 min
- Carico solido/poroso max: 6 kg
- N 134° **
- Pressione: 2,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 4 min
- Durata della fase di asciugatura: 4 min
- Durata totale con carico standard*: 24 min
- Carico solido/poroso max: 6 kg
- S 121° **
- Pressione: 1,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 20 min
- Durata della fase di asciugatura: 15 min
- Durata totale con carico standard*: 32 min
- Carico solido/poroso max: 6 kg
- S 134° **
- Pressione: 2,05 bar
- Durata della fase di sterilizzazione: 4 min
- Durata della fase di asciugatura: 15 min
- Durata totale con carico standard*: 18 min (E8-9) / 17 min (E10)
- Carico solido/poroso max: 6 kg
- *Il tempo non comprende la fase di asciugatura e può variare nella misura di $\pm 5\%$.
- **I cicli di tipo N e S sono attivabili mediante password fornita da Euronda.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12011305

EAN / GTIN

8023279356786

CODICE GEF

35678



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it